

Stabilität des Untersuchungsmaterials



Das Team des Immunologischen Labors möchte darauf hinweisen, dass die korrekte Präanalytik der Proben bis zum Eintreffen ins immunologische Labor in Ihrer Verantwortung liegt (Zeitfaktor, Temperatur, Lagerung...). Danach ist es unsere Aufgabe für eine korrekte Probenhandhabung zu sorgen. Bitte kein Postversand am Freitag und vor Feiertagen, sonst muss das Probenmaterial verworfen werden. Den Begriff der Stabilität beziehen wir auf den Zeitpunkt des Einlangens der Probe im Labor. Nachanforderungen nur bei klinischer Dringlichkeit (Kontakt: +43 316 385 12649)

Erforderliches Probenmaterial siehe Link

[Laborkatalog - Immunologie-Labor \(kages.at\)](https://www.uniklinikumgraz.at/laborkatalog-immunologie-labor)

<https://www.uniklinikumgraz.at/inneremedizin/rheumatologie>

Parameter	Stabilität
B-Zell Subsets	Lithium Heparin Blut, Lagerung bei Raumtemperatur, maximal 24 Stunden bis zur Analyse. Montag bis Freitag bis 11 Uhr möglich.
Immunstatus klein bzw. erweitert (CD3, CD4, CD8, CD16+56, CD19 bzw. CD8, CD38, HLA-DR)	EDTA Vollblut, Lagerung bei Raumtemperatur, maximal 24 Stunden bis zur Analyse. Montag bis Freitag bis 11 Uhr möglich.
Lymphozytenstimulationstest	Lithium Heparin Blut, bei Raumtemperatur, am Tag der Abnahme zu verarbeiten. Nur Montag, Dienstag und Freitag bis 10 Uhr möglich. NICHT möglich wenn 3 Tage nach der Blutabnahme ein Feiertag ist. Telefonische Voranmeldung notwendig (+43 316 385 12649).
Phagozytose	Lithium Heparin Blut, Granulozyten sind im Blut nur für eine begrenzte Zeit funktionsfähig. Bei Raumtemperatur, maximal 8 Stunden bis zur Analyse. Montag bis Freitag bis 10 Uhr möglich.
Oxidativer Burst	Lithium Heparin Blut, Granulozyten sind im Blut nur für eine begrenzte Zeit funktionsfähig. Bei Raumtemperatur, maximal 24 Stunden bis zur Analyse. Montag bis Freitag bis 10 Uhr möglich.
TB-Spot	Lithium Heparin Blut muss bei Raumtemperatur am Tag der Abnahme innerhalb von 8 Stunden im Labor einlangen. Montag bis Donnerstag bis 10 Uhr möglich; nicht vor Feiertagen. Nur bei unklarem Quantiferon TB Gold Test
QuantIFERON-TB GOLD Plus	Montag bis Donnerstag bis 14 Uhr möglich; nicht vor Feiertagen. Informationen zum Abnahmeset (Abnahmeröhrchen) http://www.quantiferon.com/wp-content/uploads/2017/09/L1085208de_IFU_QFTPlus_Bloodtubes_R03_ROW.pdf
Zytokine Multiplex, sCD40L	Lithium Heparin Vollblut muss am Tag der Abnahme bis 14 Uhr gekühlt im Labor einlangen.

Literaturnachweis:

Labor und Diagnose, Lothar Thomas 7. Auflage, Stand 11/2017